

Peristomal kroppsprofil vurderingsverktøy

6 steg for å vurdere det peristomale området og sikre korrekt tilpasset produktløsning

Pasient:

Dato:

1	Magens form rundt stomien. Formen kan endre seg når du sitter, ligger eller beveger deg.		Flat	Området er mer eller mindre på nivå med magen, men hudoverflaten kan være ujevn.
			Innover	Synker inn i magen og lager en grop.
			Utover	Står ut fra magen og lager en topp.

Flat



Innover



Utover/brokk



2	Velg den beskrivelsen som passer best på området rundt din stomi.		Jevn	Området rundt stomien er ganske jevnt.
			Ujevn	Området rundt stomien er ujevn.

Flat

Jevn



Innover

Jevn



Utover/brokk

Jevn



Ujevn



Ujevn



Ujevn



3	Er magen myk eller fast?		Myk	Området gir etter for trykk (som når du trykker på en vannmadrass).
			Fast	Området gir ikke etter for trykk (som når du trykker under hælen).

Myk mage



Fast mage



4	Er det overflatiske eller dype ujevnheter?		Overflatiske	Huden rundt stomien er furet eller rynkete.
			Dype	Huden rundt stomien har dype folder av løs hud eller overskuddsfett.

Overflatiske folder




Dype folder




5	Stomiens plassering	Over bøyelinjen	Stomien er plassert over bøyelinjen.
		I bøyelinjen	Stomien er plassert i bøyelinjen.
		Under bøyelinjen	Stomien er plassert under bøyelinjen.


Over bøyelinjen

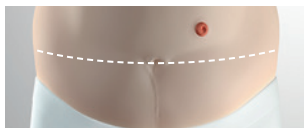

I bøyelinjen

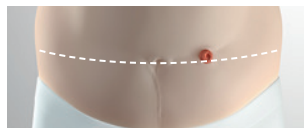

Under bøyelinjen

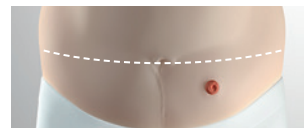

6	Stomiens nivå i forhold til hudoverflaten	Over hudnivå	Stomien er over hudoverflaten
		I hudnivå	Stomien er i nivå med hudoverflaten.
		Under hudnivå	Stomien er under hudoverflaten.

Stomiens åpning er over hudoverflaten



Stomiens åpning er i nivå med hudoverflaten



Stomiens åpning er under hudoverflaten



Konsistensen på det som kommer ut av stomien

Type output	Tykk avføring	
	Flytende avføring	
	Urin	

Anbefalt løsning

Type hudplate	Produktløsning	Posetype
Flat	1-dels system	Tømbar pose
Soft Convex	2-dels system (ringkobling med lås)	Lukket pose
Light Convex	2-dels system (kleberkobling)	Urostomipose
Deep Convex		
Concave		
Annet		

Tilbehørsprodukter

Øvrige faktorer som har hatt betydning for produktvalg (sett gjerne flere kryss)

Den peristomale huden	Pasientens mulighet til hjelp i hjemmet
Pasientens generelle helsetilstand	Pasientens kompetanse